


Autoject[®] 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Автоинъектор **Autoject 2 REMOVABLE NEEDLE** является автоматическим устройством и используется только со шприцами BD™ Tuberculin (США) на 1 мл 1/2" Precision Glide™ со съёмной иглой.

Компоненты автоинъектора:	Корпус инъектора, Держатель шприца, Удлиненный регулятор глубины прокола, Желтое направляющее устройство,	Желтый индикатор, Красный индикатор, Чехол для хранения автоинъектора, Инструкция по применению.
----------------------------------	--	---

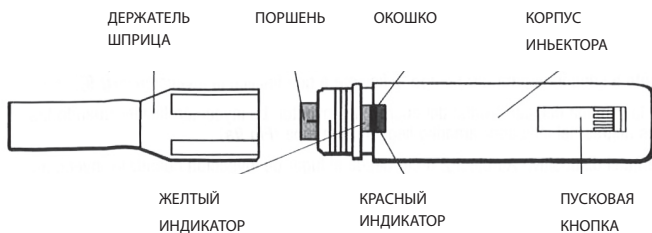

УДЛИНЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ГЛУБИНЫ ПРОКОЛА



Рис. 1

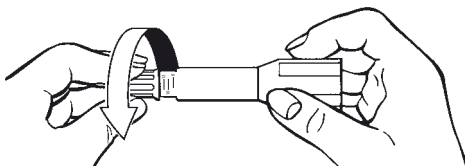


Рис. 2



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для индивидуального использования!

Не используйте автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** без шприца или с незаполненным шприцом, т.к. это может повредить автоинъектор или шприц.

Не направляйте **Autoject 2 Removable Needle** на себя ИЛИ КОГО-ЛИБО ДРУГОГО непосредственно перед проведением инъекции.

Не используйте автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** в немедицинских целях.

Не используйте автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** со стеклянными шприцами.

Всегда проверяйте, чтобы вся доза лекарственного препарата была введена полностью. Если вы ввели дозу лекарственного препарата не полностью, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, что делать в данном случае.

Автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** применяется только для подкожных инъекций.

СОВМЕСТИМЫЕ ШПРИЦЫ

Автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** может использоваться только со шприцами BD™ Tuberculin (США) на 1 мл 1/2" Precision Glide™ со съёмной иглой.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ШПРИЦАМИ BD™ Tuberculin на 1 мл, ПРОИЗВЕДЕННЫМИ В МЕКСИКЕ.

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ПРОКОЛА

Глубина прокола должна быть настроена до заправки и использования автоинъектора **Autoject 2 Removable Needle**. Перед использованием автоинъектора **Autoject 2 Removable Needle** проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы определить правильную глубину прокола, необходимую для введения вашего лекарственного препарата.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Метки шкалы предназначены для контроля глубины проникновения иглы.

Перед каждым использованием автоинъектора **Autoject 2 Removable Needle** необходимо установить глубину прокола с использованием соответствующего регулятора глубины на величину, необходимую для данного шприца.

Например, для установления глубины равной 8 мм, вам необходимо вкрутить регулятор глубины прокола в держатель шприца до отметки 8 (рис. 1), чтобы край начала держателя точно совпадал с ней (рис. 2).

Если ваш лечащий врач рекомендует вам использовать другую глубину прокола, то она устанавливается таким же способом. Для увеличения глубины прокола вам необходимо поворачивать регулятор далее до соответствующей отметки.

Каждое деление шкалы эквивалентно 2 мм глубины прокола иглы. Максимально рекомендуемая глубина прокола составляет 12 мм.

Рис. 3

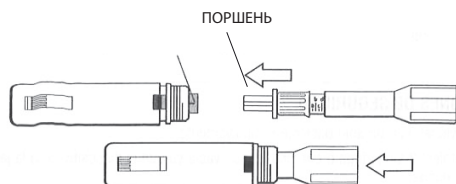


Рис. 4

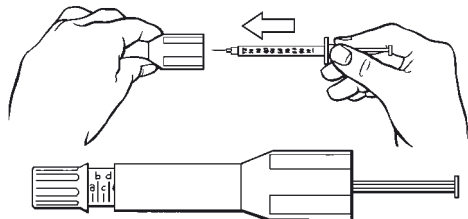


Рис. 5


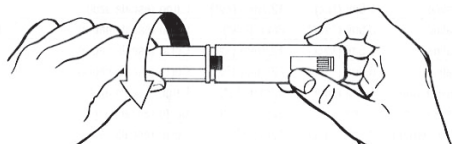


Рис. 6

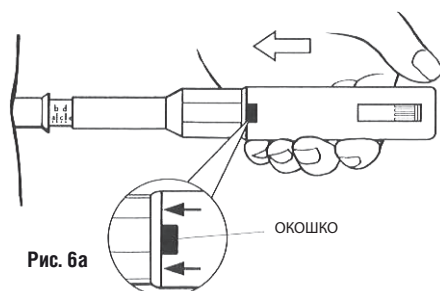

ЗАПРАВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTOJECT 2 REMOVABLE NEEDLE

1. Чтобы настроить автоинъектор Autoject 2 Removable Needle, установите регулятор глубины прокола прямо напротив поршня внутри корпуса автоинъектора. Нажмите и соедините до упора (рис. 3). Затем извлеките держатель шприца из корпуса автоинъектора.
2. Перемешайте в шприце требуемую дозу лекарственного средства, не снимая с иглы колпачок.
3. Вставьте шприц в держатель, предварительно сняв защитный колпачок с иглы (рис. 4).
4. Аккуратно присоедините держатель шприца к корпусу автоинъектора, избегая случайного нажатия пусковой кнопки (рис.5). Убедитесь в том, что регулятор глубины прокола находится в правильной позиции.
5. Выберите место для инъекции и прижмите автоинъектор к месту прокола (рис. 6). Несильно надавите на место прокола таким образом, чтобы корпус автоинъектора переместился по направлению к держателю шприца. Надавливайте до тех пор, пока в окошке не появится красный индикатор. Красный индикатор означает, что блокировка снята и можно нажать пусковую кнопку (рис. 6а)
6. Нажмите на зеленую пусковую кнопку. При этом игла будет введена под кожу с автоматической инъекцией содержимого шприца. Держите устройство в том же положении в течение 5 секунд для полного введения лекарственного препарата (рис. 6).
7. Следите за окошком на корпусе автоинъектора. Инъекция считается завершенной, когда черные линии исчезнут на желтом индикаторе. (рис. 6а).
8. Приподнимите автоинъектор и отведите его от места прокола.
ВНИМАНИЕ! Игла, не удаленная из устройства, представляет опасность.
9. После использования, отсоедините держатель шприца от корпуса инъектора и удалите использованный шприц из устройства. После проведения инъекции необходимо убедиться, что в шприце не осталось лекарственного препарата, и безопасным способом утилизировать использованные шприцы и иглы, убрав их в специальный медицинский контейнер для острых предметов.
10. Положите автоинъектор **Autoject 2 Removable Needle** в защитный чехол.

УХОД ЗА АВТОИНЪЕКТОРОМ AUTOJECT 2 REMOVABLE NEEDLE

Внешние компоненты автоинъектора **Autoject 2 Removable Needle** очищайте влажной тряпочкой.

ГАРАНТИЯ

На автоинъекторы **Autoject 2 Removable Needle** распространяется гарантия в течение 2 лет с момента приобретения на отсутствие производственных дефектов.

В случае поломки необходимо обратиться в офис ООО «БиоСистемы» – официального дистрибьютора компании Owen Mumford в России.

Сделано в Великобритании

 **OWEN MUMFORD**

www.owenmumford.com

BioSystemy
группа компаний БИОЛАЙН

197101, Россия, Санкт-Петербург
пер. Пинский, д. 3, лит. А
тел.: (812) 320 49 49,
факс: (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Единый бесплатный
номер отдела по работе
с клиентами для всех
регионов России:

8 800 555 49 55